

Vorbereitung

1. Wir schalten Sie frei

Um millCONNECT nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst unter folgender Webseite registrieren:

<https://connect.millhouse.de/register>

>>> Oder einfach auf den Link „millCONNECT Registrierung“ in unserem Downloadbereich klicken.

Bitte füllen Sie **alle Felder** aus und senden Sie das Formular über den orangefarbenen Button ab. Sie werden schnellstmöglich für die Verwendung freigeschaltet.

2. Download der Installationsdatei

Laden Sie das Software-Paket aus unserem **Downloadbereich** herunter:


www.millhouse.de/downloads >>> 2 \ millCONNECT

Klicken Sie dazu auf den Link „millCONNECT Installationsdatei“.

Die Datei wird auf Ihren Computer geladen und unter Downloads gespeichert.

Die konkrete Installationsanleitung finden Sie auf Seiten 2-4 >>>


The screenshot shows the registration form for millCONNECT. At the top, there are logos for 'millCONNECT' and 'millhouse' with a support number 'Support: 06122 520205'. The form is titled 'Registrierung' and contains the following fields: 'E-Mail:', 'Kunden-ID*', 'Name Labor/Praxis', 'Passwort:', and 'Passwort wiederholen:'. Each field has a corresponding input box. At the bottom right of the form, there is an orange button labeled 'ABSENDE'. A mouse cursor is pointing at this button. A callout box with an orange border points to the 'Kunden-ID*' field, containing the text: 'Ihre Kunden-ID finden Sie beispielsweise in Ihrer millhouse-Rechnung.' At the bottom of the form, there is a small copyright notice: '© millhouse GmbH. Alle Rechte vorbehalten.'

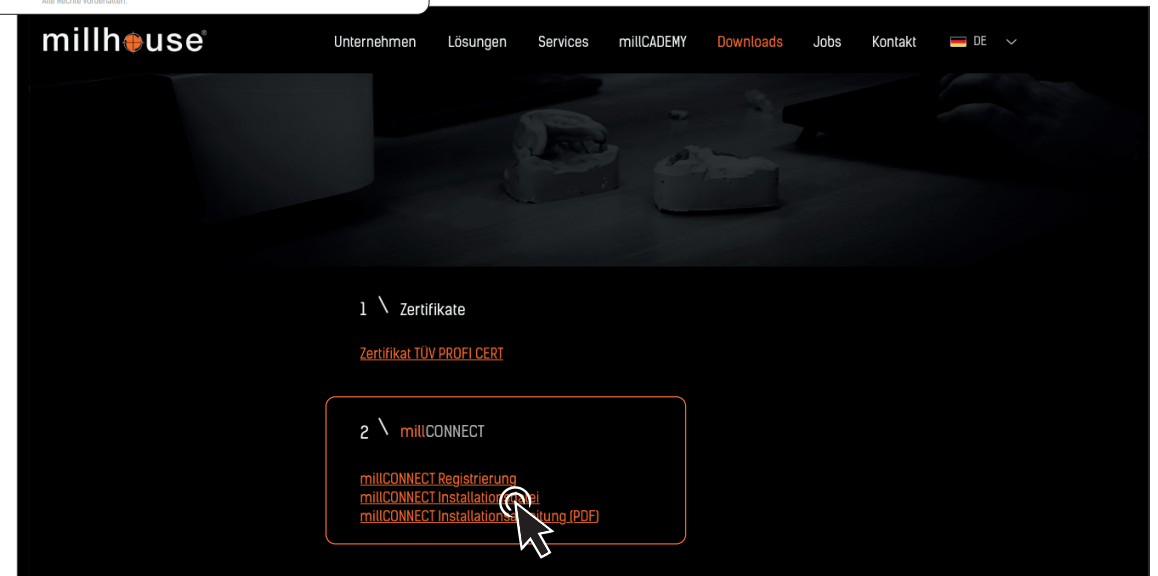

Installation

1. Installationsdatei finden

- Nach dem Herunterladen liegt die millCONNECT-Datei auf Ihrem Computer im Ordner „Downloads“. Sie heißt **millCONNECT-Setup.exe**.
- Machen Sie einen Doppelklick auf die Datei.

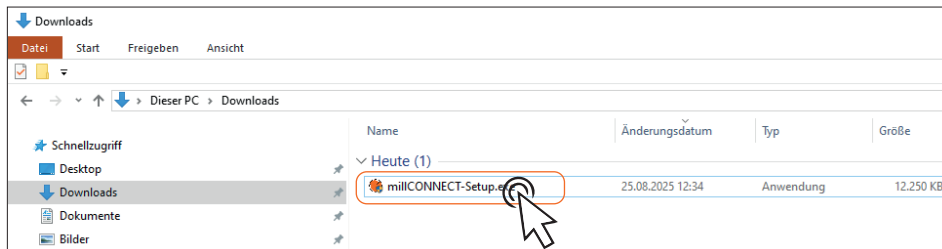

2. Installation starten

- Je nach Windows-Version erscheint eine **Sicherheitsmeldung**. Das ist normal.
- Klicken Sie auf den Text **„Weitere Informationen“**.



3. Sicherheitsmeldung übergehen

- Danach erscheint unten ein neuer Button: **„Trotzdem ausführen“**.
- Klicken Sie darauf, um die Installation zu starten.



4. Installation einrichten


- Ein neues Fenster öffnet sich.
- Klicken Sie hier auf **„Weiter“**.






5. Benutzer auswählen

- Nun werden Sie gefragt, ob **millCONNECT** für alle Benutzer oder nur für Sie selbst installiert werden soll.
- Tipp: Wählen Sie: „Installation nur für mich“. Somit erstellen Sie automatisch die Verknüpfung auf Ihrem Desktop.
- Danach klicken Sie wieder auf „Weiter“.

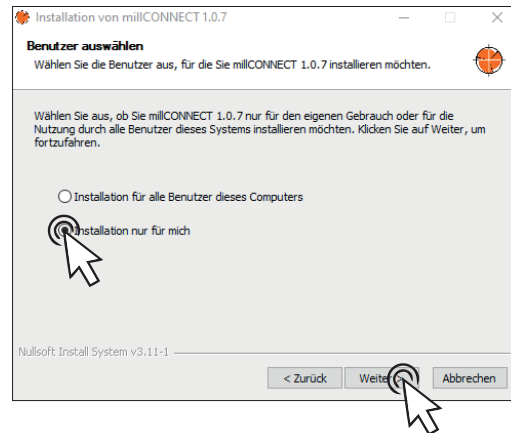


6. Installationsort festlegen

- Sie können auswählen, wohin **millCONNECT** gespeichert werden soll.
- Tipp: Lassen Sie den vorgeschlagenen Ort unverändert.
- Klicken Sie auf „Installieren“.

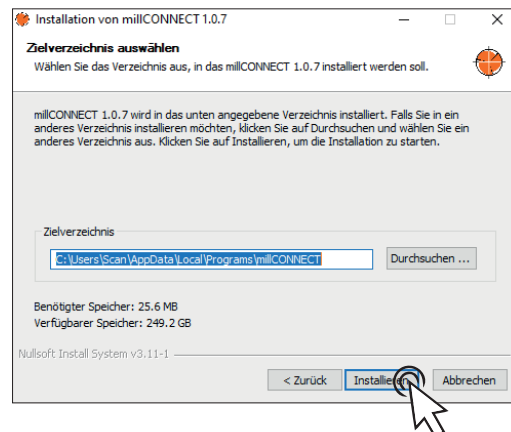

7. Installieren

- Jetzt installiert Windows das **millCONNECT**.
- Sie sehen verschiedene Meldungen, die Sie einfach ignorieren können.
- Sobald die Installation vollständig durchgeführt ist, klicken Sie auf „Weiter“.
- In der abschließenden Ansicht kann die Installation mit dem Klicken auf „Fertigstellen“ geschlossen werden.

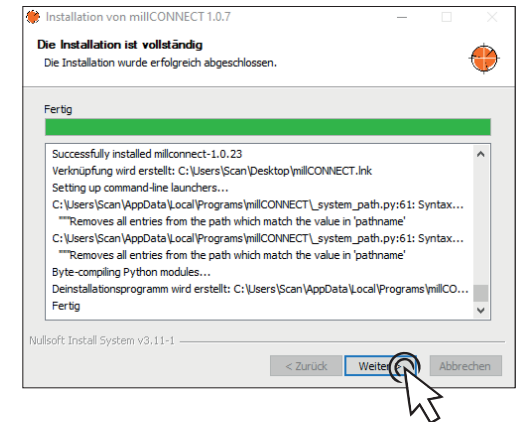


8. Integration in exocad einrichten (gilt nicht für 3Shape Dental System)

Das neue Tool ist nun auf Ihrem Computer startklar.

Im nächsten Fenster können Sie einen zusätzlichen Knopf in Ihre **exocad** hinzufügen, um Projekte direkt über **millCONNECT** zu versenden.

Wählen Sie dazu einfach die gewünschte exocad-Version aus der Liste und bestätigen Sie mit „Weiter“.

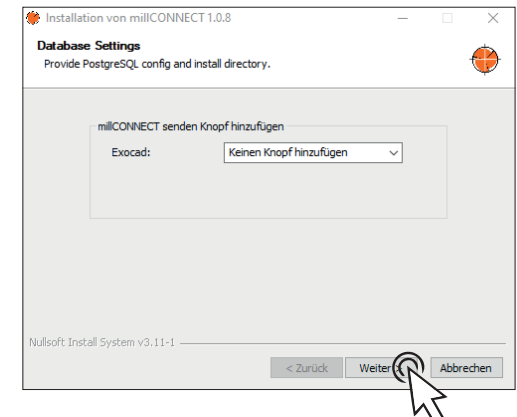

Installation der millCONNECT

Gültig ab Oktober 2025


millhouse®

>>>

Bitte beachten Sie: Die Funktion aus Schritt 8 steht ausschließlich für die exocad-DentalCAD zur Verfügung und nur wenn diese vom millhouse eingerichtet wurde.

9. Installation abschließen

Sie haben millCONNECT erfolgreich installiert.
Das Programm ist nun auf Ihrem Computer startklar.

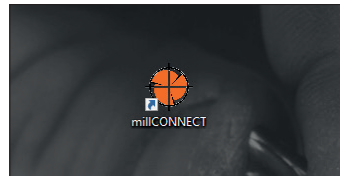

Wir freuen uns auf Ihre Aufträge!



Bei Fragen erreichen Sie unser **Support-Team**
montags bis freitags von 9:00 – 17:00 Uhr unter

06122 520205