


Installation: Upgrade exocad Rijeka

Gültig ab 01. April 2023

millhouse®




1. Laden Sie das Upgrade exocad Rijeka von der millhouse-Webseite herunter: www.millhouse.de/downloads (Punkt 4: exocad Rijeka Software)
2. Öffnen Sie Ihren Download-Ordner und entpacken Sie die heruntergeladene Datei.
Passwort: millhouserijeka2023
Es entsteht ein neuer Ordner „8349_Rijeka“.
3. Den Inhalt des neuen Ordners kopieren Sie über „Ausschneiden“ und „Einfügen“ unter C:\millhouse bzw. dem Speicherort Ihrer bisherigen exocad-Version.
4. Öffnen Sie den neuen Ordner und ändern Sie die Einstellungen unter 8349_Rijeka > DentalDB > config > settings-db.xml gemäß dem Inhalt Ihrer bisherigen exocad-Einstellungen unter „settings-db.xml“.

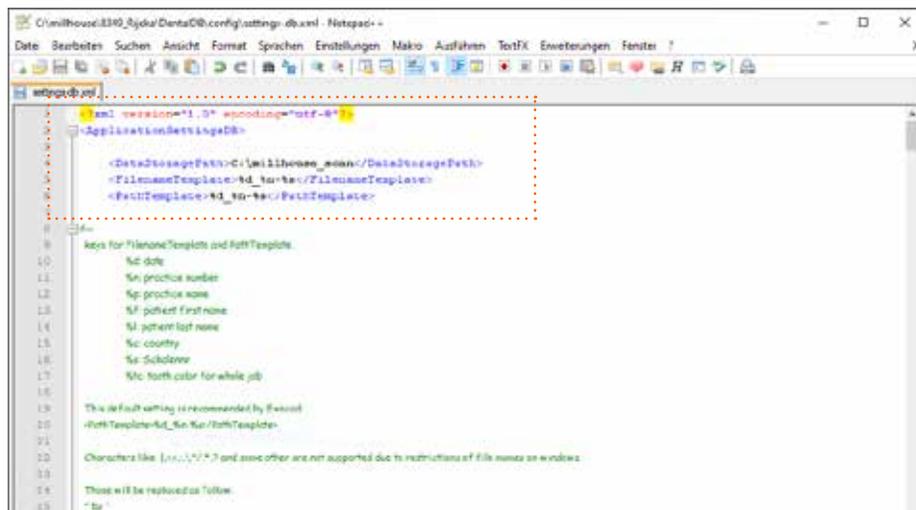

5. Empfehlung

Zum schnellen Öffnen der Anwendung erstellen Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop Ihres PCs:

- Öffnen Sie den Pfad „8349_Rijeka > DentalDB > bin“
- Rechtsklick auf die „DentalDB.exe“
- Senden an > Desktop (Verknüpfung erstellen):

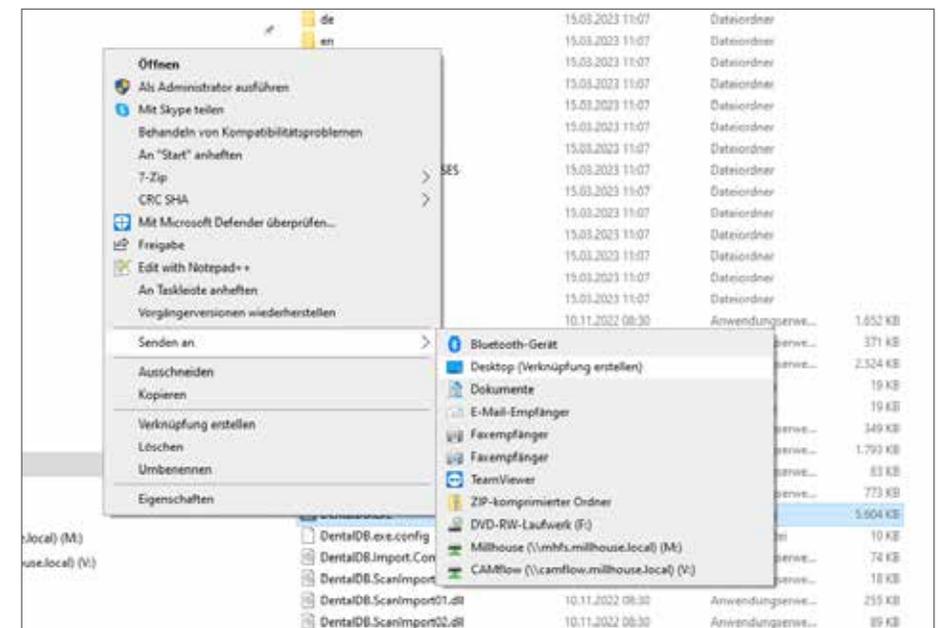

Die Installation war erfolgreich. Viel Spaß beim Designen!



Bei Fragen erreichen Sie unser **Support-Team** montags bis freitags von 9:00 – 17:00 Uhr unter

06122 520205